


Sistema de transporte neonatal Dräger TI500 Globe-Trotter™

El sistema de transporte neonatal Dräger TI500 Globe-Trotter combina toda la tecnología del sistema de transporte Dräger TI500 con funciones adicionales, para garantizar un mayor cuidado del neonato durante su traslado.

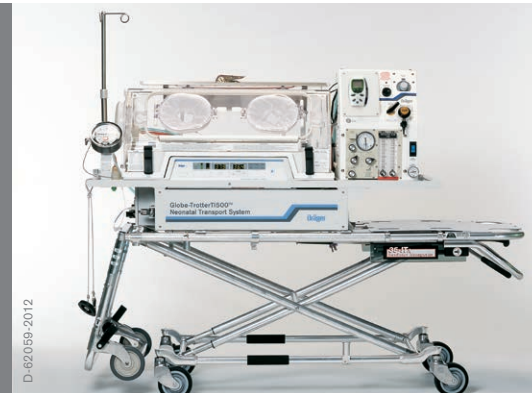

(Distintas configuraciones)

SOPORTE DE VENTILACIÓN INTEGRADO

El sistema de transporte neonatal Dräger TI500 Globe-Trotter está diseñado para trasladar niños en un ambiente térmicamente neutral, con soporte ventilatorio integrado. También puede configurarse con analizadores de ventilación y de oxígeno para satisfacer las necesidades específicas de cada paciente.

PANEL DE CONTROL FRONTAL

Además de los controles de la incubadora, todos los controles relacionados con la ventilación, con los indicadores de las botellas y con el sistema de gas se encuentran en la parte delantera para un acceso rápido y una mejor visibilidad.

ALMACENAMIENTO INTERNO DE BOTELLAS

Las botellas de gas están ubicadas debajo de la incubadora, en el armazón del sistema, para poder trasladarlos fácilmente junto con la incubadora. Los reguladores, los racores del yugo y los flujómetros están integrados para prescindir de tubos externos.

OPCIÓN DE COMPRESOR DE AIRE

De todos los sistemas de transporte neonatal líderes en la industria, el TI500 Globe-Trotter es el único que ofrece un compresor de aire integrado. De esta manera, el paciente recibe aire de grado médico, sin la necesidad de transportar botellas de aire.

FLUJÓMETRO AUXILIAR

El sistema incorpora un flujómetro auxiliar de manera estándar, con un circuito manual adicional que permite realizar resucitaciones manuales en caso necesario. De este modo, es posible ventilar mellizos en una misma incubadora.

OTRAS VENTAJAS CLAVE

- Permite suministrar fluidos y monitorizar las constantes vitales
- Los dispositivos de protección contra baches evitan una extubación accidental del neonato
- Capacidad de recargar las baterías de equipo auxiliar
- Distintos tipos de soporte
- Posibilidad de agregar una segunda batería

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Altura	58,4 cm (23 pulg.)
Longitud	129,5 cm (51 pulg.)
Anchura	56,5 cm (22,5 pulg.)
Peso sin el compresor	71,6 kg (158 lbs) ¹⁾
Peso con el compresor	83,9 kg (185 lbs)

Especificaciones eléctricas

Alimentación eléctrica (CA)	110/120 V, 50/60/400 Hz 220/240 V, 50/60/400 Hz
CC (sólo la incubadora)	12 V ó 28 V
Corriente de fuga del chasis	120 V < 300 µA + 10% 220 V < 500 µA + 10%
6 tomas de corriente CA	
Cables de CA y de CC (para la incubadora) incluidos	

Especificaciones de la batería del compresor

Tipo	Batería de gel recargable y sellada, de 12 V CC y 20 AH
Duración de la batería	3 horas como mínimo, con el mezclador de oxígeno ajustado a 21%
Vida útil	200 ciclos de carga/descarga completos, como mínimo
Tiempo de carga	20 horas (en caso de descarga completa)
Alarma de batería baja	Cuando restan 30 minutos de aire en el compresor

Notas: ¹⁾ el peso incluye una batería

Globe-Trotter es una marca comercial de Dräger.



SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moisinger Allee 53-55
23558 Lübeck, Alemania

www.draeger.com

FABRICANTE:

Dräger Medical Systems, Inc.
3135 Quarry Road
Telford, PA 18969-1042, USA

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto



SEDE REGIONAL

PANAMÁ

Dräger Panamá S. de R.L.
Business Park, Torre V, piso 10
Av. De la Rotonda
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130

VENTAS INTERNACIONALES

PANAMÁ

Dräger Panamá Comercial
S. de R.L.
Business Park, Torre V, piso 10
Av. De la Rotonda
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377 9100 / Fax -9130

COLOMBIA

Dräger Colombia S.A.
Calle 93B No.13-44 Piso 4
Bogotá D.C., Colombia
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815

ARGENTINA

Dräger Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este 1717
B1607BLF San Isidro,
Buenos Aires, Argentina
Tel +54 11 48 36 8300
Fax +54 11 48 36 8321

BRASIL

Dräger Indústria e Comércio Ltda.
Al. Pucuruí, 51/61 – Tamboré
06460-100 Barueri, São Paulo
Tel +55 11 46 89 6401
Fax +55 11 41 93 2070

CHILE

Dräger Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial
El Cortijo, Conchalí,
Santiago, Chile
Tel +56 2 2482 1000 / Fax -1001

ESPAÑA

Dräger Medical Hispania S.A.
C/ Xaudaró, 5
28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 358 36 19
clientesdraegermedical@draeger.com

MÉXICO

Dräger Medical México,
S.A. de C.V.
German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 43 37
Fax +52 55 52 61 41 32

PERÚ

Dräger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41 - Perú
Tel +511 626 95-95 / Fax -73